

スライド式移乗ボード
CARE-B200

取扱説明書

この度は、株式会社ダイト製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
またお読みになったあと、本書はいつでも記載内容を確認できるような場所に保管してください。


仕 様

商 品 名	スライド式移乗ボード	重 量	約2.4kg
型 番	CARE-B200	材 質	ナイロン66、ガラス繊維、EVA
サ イ ズ	W900×D300×H40mm	最大使用者体重	180kg

内容物

本体1台、 取扱説明書1部

各部の名称

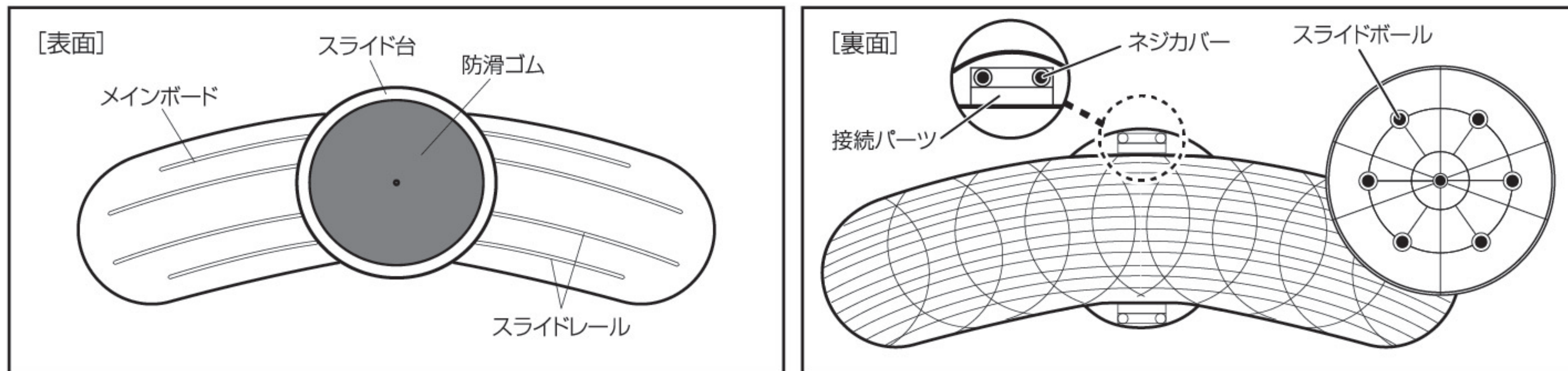

安全上の注意

この警告を無視して、間違った取り扱いをすると、要介護者または周辺の方などが死亡または重傷を負うことが想定されます。

警告

- 初めてお使いになる際は、専門家(作業療法士、理学療法士、福祉用具専門相談員など)もしくは販売店の指導のもと操作方法を習得し、本製品の特徴をよく理解した上で使用してください。
- 移乗以外の用途では使用しないでください。
- 破損や異常があった場合は使用を中止してください。
- 最大使用者体重は180kgです、使用者の体重が180kgを超える場合は、使用しないでください。
- 製品の底面は平らではなくリブ構造がありますので、指などを挟まないようご注意ください。**
- 高温多湿の場所に放置しないでください。
- 落下させたり、衝撃を与えないようにしてください。
- 本製品を改造、分解しないでください。

この注意を無視して、間違った取り扱いをすると、要介護者または周辺の方などが死亡または重傷を負うことが想定されます。

注意

- 本製品を使用する際は、ゆっくりとスムーズに操作を行い、急な引っ張りや押し込みを避け、要介護者に不快感を与えないようにしてください。
- ご使用前に車いすとベッドが動かない様、確実に固定してください。
- 必ず衣類を着用して使用してください。直接皮膚が触れた状態で使用すると怪我の恐れがあります。
- ご使用時の際、衣類や手を挟まないよう十分ご注意ください。**
- 乳幼児および小児、第三者の監督が必要な方の手の届かない場所に保管をしてください。
- 本製品はカーブ形状を採用しています。正しくご使用いただくには、要介助者はカーブの外側を向いて座り移動させてください。(図1.体の向き参照)
- ご使用の際は、スライド台の端部に座らず、臀部全体がスライド台の上にとしっかりと乗るように着座してください。**
- 安全のため、移動元と移動先との距離は40cmを超えないようご注意ください。(図2.移動距離参照)
- 移乗中に利用者から手を離さないでください。
移乗を完了するまで、利用者の身体をしっかりと支えてください。

図2.移動距離


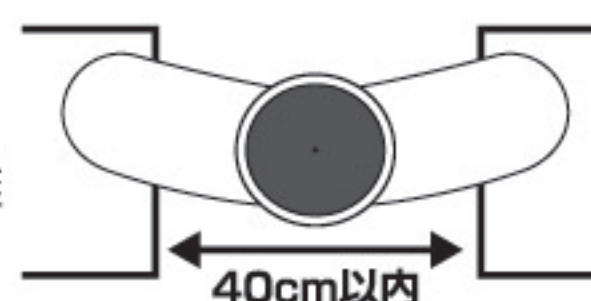



図1.体の向き

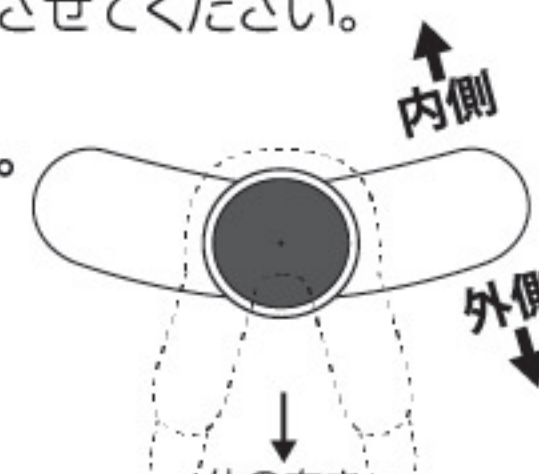

使用方法

本製品は、車いすとベッドなどの間を、要介護者が座ったままの姿勢で安全に移乗するための補助用具です。

①

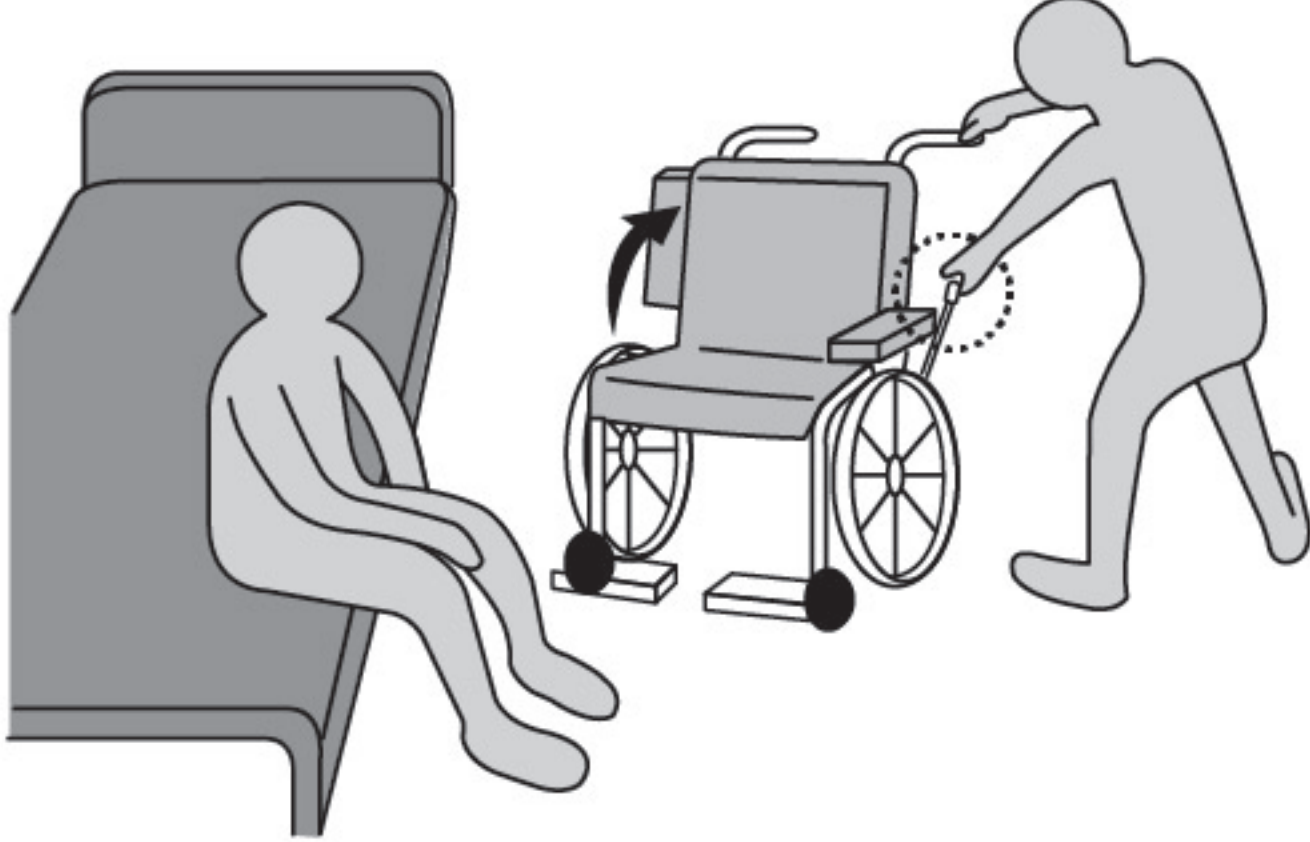

②




本体の両端が、移乗元および移乗先の両方に確実に設置されていることを確認してください。スライド台を要介護者側に移動させた後、臀部(座骨)を軽く持ち上げ、スライド台の上にしっかりと乗せてください。

移乗作業を行うスペースを十分に確保してください。
移乗先の車いすのキャスターに**ロックを確実にかけ**、
要介護者をスムーズに移動するため、アームサポートやフットレスト等が邪魔にならない様に調整してください。
※車いすと移乗先(または移乗元)の高低差が**15cm以内**になるよう、本体をできるだけ調整してください。
調整が難しい場合は、安全な移乗のために、他の介護者の協力も得るようにしてください。

③



④

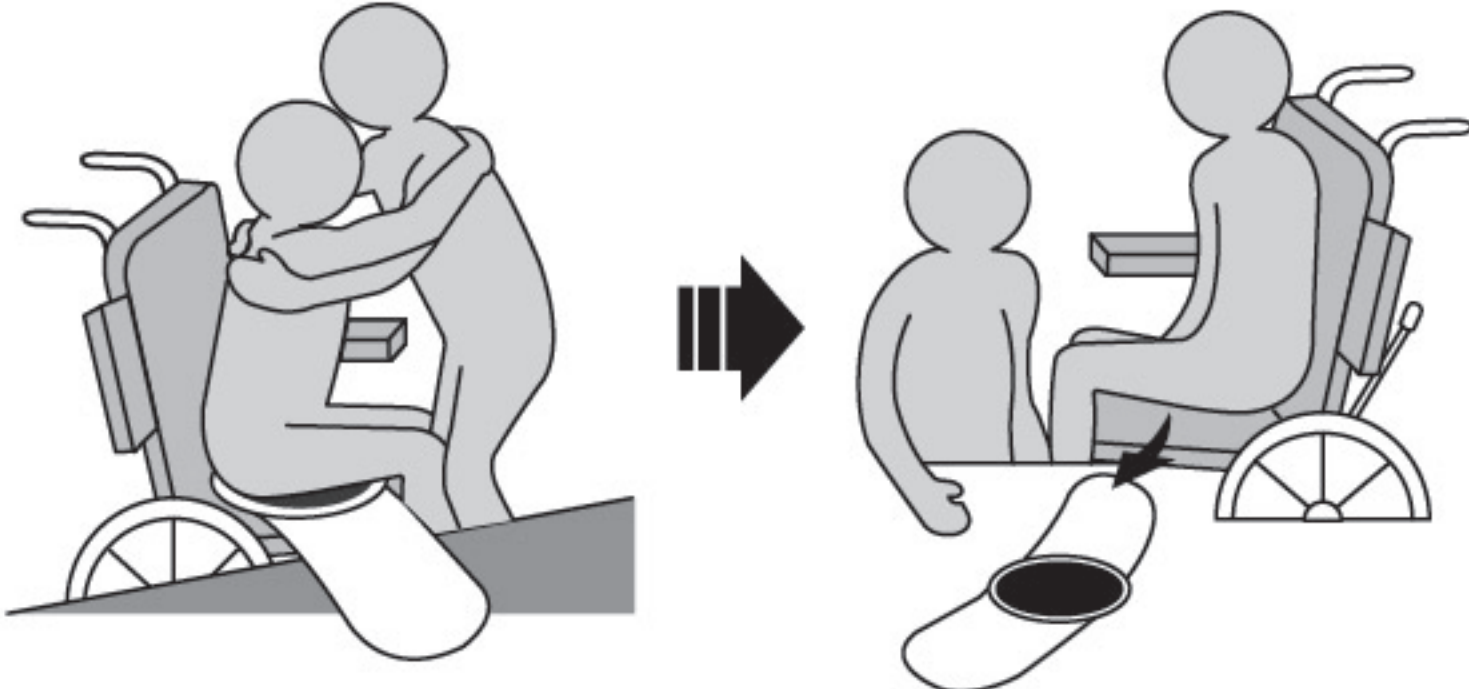

図のように移乗先へ、要介護者の体をしっかりとつかえスライド台を滑らせて移動してください。

しっかり移動先(車いす等)まで移動し、座れるようになりましたら、本体を抜くように外し完了です。

お手入れ方法

- 清拭する場合は、中性洗剤を水で薄め柔らかい布に浸し、よく絞った布で汚れを拭いてください。拭き取り後は、乾いた布で水分を拭き取り、十分に乾かしてください。
- 消毒する場合は、防滑ゴム以外の部分をアルコール消毒剤などを柔らかい布に吹き付けてから清拭してください。
防滑ゴム部分は水で薄めた中性洗剤を柔らかい布につけ拭いてください。

製品保証書

この度は、株式会社ダイト製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。取扱説明書に従って正しくご使用ください。
この製品保証書は、株式会社ダイト(以下当社という)が以下に定める製品保証規定に基づき、製品の無償修理を行うことをお約束するものです。

製品名：スライド式移乗ボード
型番：CARE-B200
保証期間：お買い上げ日より1年間
ご購入日：____年____月____日
修理連絡先：お買い上げ店にご連絡ください。
販売店名：_____

< 製品保証規定 >
●当製品の保証は、製品保証書の保証期間に取扱説明書に従って正常な使用をしていたにも関わらず、故障が発生した場合に無償修理を約束するものです。
●購入した商品が、万が一初期不良であった場合は、お買い求めの販売店、または当社のホームページの修理・メンテナンスに関するメールフォームにご連絡ください。
●保証期間内の無償修理は、故障製品を当社宛に返送いただき、修理が完了しましたら、当社から修理完了品をお客様に送付いたします。また、その際の送料は、全て当社負担とさせていただきます。

- 保証期間内であっても以下の項目に該当する場合は、保証の対象外とさせていただきます。
 1. 使用上の誤り、又は不当な修理や改造によって生じた故障、損傷
 2. 輸送、移動、落下等によって生じた故障、損傷
 3. 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、静電気、異常電圧等の外部要因によって生じた故障、損傷
 4. 浸水、泥、埃、その他異物の混入による故障、損傷
 5. 車両、船舶等に搭載されたことによって生じた故障、損傷
 6. 消耗部品
 7. 製品保証書の字句を不当に書き換えられた場合
 8. 本製品の使用によるその他の製品の損害
 9. その他合理的事由により、当社が保証対象外と判断した場合
- 本書は日本国内でのみ有効です。

本製品は改良のため断りなく外観、仕様を変更することがあります。

製品に関するお問い合わせは下記ホームページまでお願い致します。

daito

株式会社

ダイト

本社：〒112-0014 東京都文京区関口3-4-3
URL: <https://www.daito-inc.co.jp>

2025.8版